

СИСТЕМА

ЭФФЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ СУБКЛИНИЧЕСКИХ МАСТИТОВ


Globalvet*
group

Соматик-Тест СМТ (Somatic-Test) – диагностическое средство в форме раствора, предназначенное для определения количества соматических клеток в молоке. Соматик-тест СМТ – предназначен для диагностики субклинического мастита экспресс-методом. Исследования проводят с 4-го дня после отёла на специальных пластинах (планшетах). Сдаивают по 2 мл молока из каждой четверти на чаши планшета и с помощью дозатора добавляют Соматик-Тест. Реакцию определяют по степени образования сгустка. Чувствительность теста от 170000 соматических клеток/1 мл. Простота применения, точность и эффективность данной тест системы позволяют использовать её в качестве экспресс-метода для контроля количества соматических клеток как у отдельно взятой коровы, а так же в сборном молоке.


ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ




- Сцедите первые три струйки молока содержащие большое количество соматических клеток и микроорганизмов в отдельную емкость

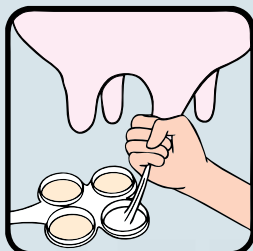

- Из каждой доли вымени сцедите немного молока в соответствующие чаши тест пластины до линии указателя уровня

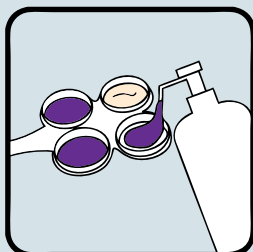

- Нажимая на шток дозирующего насоса по одному разу, влейте в каждую чашу порцию реагента (2 мл)

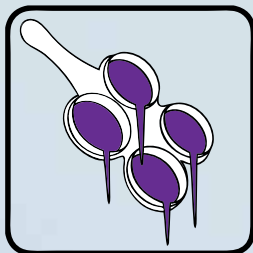

- Легкими круговыми движениями плашки перемешайте реагент с молоком
- Через несколько секунд произведите интерпретацию теста
- Вылейте исследованную смесь и промойте чашечки чистой водой

