



УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «Глобал-Вет»

Н.А. Лаврова

« 1 » *август* 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ГлобалВет Ультрагеля для животных

(организация-производитель ООО «ВЕТТОРГ», Россия)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ГлобалВет Ультрагель (GlobalVet Ultra Gel).

2. ГлобалВет Ультрагель – гель для ультразвукового исследования животных всех видов, содержащий воду очищенную, глицерол, регулятор кислотности, карбомер, загуститель, консервант, диоксид кремния, смягчающий компонент и краситель.

3. ГлобалВет Ультрагель представляет собой прозрачный бесцветный гель на водной основе.

4. Выпускают ГлобалВет Ультрагель в пластиковых флаконах с навинчивающимися крышками по 5 литров и по 150 мл.

5. Хранят ГлобалВет Ультрагель в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре не выше +25°С.

ГлобалВет Ультрагель следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Срок годности при соблюдении условий хранения в упаковке – 5 лет со дня изготовления. По истечении срока годности ГлобалВет Ультрагель не должен применяться.

II. СВОЙСТВА

7. Применение ГлобалВет Ультрагеля во время проведения процедуры ультразвукового исследования обеспечивает акустический контакт электрода с кожей животного, высокую проводимость ультразвуковых волн, что в значительной степени способствует точности проведения диагностики. Обладая определенной вязкостью, гель обеспечивает легкое скольжение датчика по поверхности тела.

ГлобалВет Ультрагель как контактная среда совместим с любой отечественной и импортной аппаратурой.

ГлобалВет Ультрагель безвреден, не вызывает раздражения кожи.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. ГлобалВет Ультрагель предназначен для применения в качестве контактной среды для ультразвукового исследования животных всех видов.

9. Противопоказаний для применения геля не установлено.

10. ГлобалВет Ультрагель наносится на поверхность тела в районе обследуемого участка в количестве, обеспечивающем лёгкое скольжение датчика. После окончания исследования гель легко удаляется с помощью бумажной салфетки.

11. Побочных явлений и осложнений при использовании ГлобалВет Ультрагеля в соответствии с инструкцией по применению не наблюдается, противопоказаний не установлено.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

12. При применении ГлобалВет Ультрагеля следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с гигиеническими средствами. Запрещается использование пустых флаконов из-под геля для бытовых целей.

13. Запрещается использование пустых флаконов из-под геля для бытовых целей.

Инструкция разработана ООО «Глобал-Вет» (г. Москва) совместно с ООО «ВЕТТОРГ», (Россия).

Организация-производитель ООО «ВЕТТОРГ», Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 2/50, строение 3.