



УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «Глобал-Вет»

Н.А. Лаврова

« »

2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ГлобалВет Универсального геля для животных

(организация-производитель ООО «ВЕТТОРГ», Россия)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Глобал Вет Универсальный гель (GlobalVet Universal Gel).

2. ГлобалВет Универсальный гель – гель для гигиенических и ветеринарных манипуляций, искусственного осеменения и массажа, содержащий воду очищенную, регулятор кислотности, карбомер, глицерол, консервант, смягчающий компонент и адгезирующий компонент.

3. ГлобалВет Универсальный гель представляет собой прозрачный бесцветный гель на водной основе.

4. Выпускают ГлобалВет Универсальный гель в пластиковых флаконах с навинчивающимися крышками по 5 литров и по 150 мл.

5. Хранят ГлобалВет Универсальный гель в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре не выше +25°C.

ГлобалВет Универсальный гель следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Срок годности при соблюдении условий хранения в упаковке – 5 лет со дня изготовления. По истечении срока годности ГлобалВет Универсальный гель не должен применяться.

II. СВОЙСТВА

7. ГлобалВет Универсальный гель представляет собой качественный смазочный материал на водной основе для гигиенических и ветеринарных манипуляций, искусственного осеменения и массажа.

Благодаря нейтральному значению pH, ГлобалВет Универсальный гель не вызывает раздражения кожи и слизистых оболочек, не влияет на жизнеспособность спермиев, совместим с акушерскими перчатками из латекса и полиэтилена.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. ГлобалВет Универсальный гель используется для гигиены и очищения кожи и слизистых оболочек животных; ручного доения животных, ухода за кожей вымени после доения; лучшего скольжения руки и инструментов при массаже и ветеринарных манипуляциях; для уменьшения раздражения тканей и болезненных ощущений у животных при вагинальном и ректальном обследовании, акушерских вмешательствах, искусственном осеменении ректо-цервикальным способом.

9. Противопоказаний для применения геля не установлено.

10. ГлобалВет Универсальный гель применяется наружно и местно.

Очищение кожи и слизистых оболочек животных производят необходимым количеством геля с помощью ватного тампона.

При ректальном или вагинальном обследовании, при искусственном осеменении ректо-цервикальным способом, а также при родовспоможении непосредственно перед проведением манипуляций гелем обрабатывают перчатки и инструменты.

Для массажа, ручного доения и обработки вымени после доения гель наносят руками на кожу, равномерно распределяя ровным тонким слоем по поверхности.

При необходимости гель легко удаляется бумажной салфеткой или водой.

11. Побочных явлений и осложнений при использовании ГлобалВет Универсального геля в соответствии с инструкцией по применению не наблюдается, противопоказаний не установлено.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

15. При применении ГлобалВет Универсального геля следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с гигиеническими средствами.

16. Запрещается использование пустых флаконов из-под геля для бытовых целей.

Инструкция разработана ООО «Глобал-Вет» (г. Москва) совместно с ООО «ВЕТТОРГ», (Россия).

Организация-производитель ООО «ВЕТТОРГ», Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 2/50, строение 3.